



# MESMO®

**fein-mikrotexturierte  
Brustimplantate**

Made in  
Germany

POLYTECH

*Glatt vs. texturiert?  
Warum Kompromisse eingehen?*

# MESMO®

## fein-mikrotexturierte Brustimplantate

Soll ein gewünschtes ästhetisches Ergebnis erzielt und Patientinnen zufriedengestellt werden, spielt **die Textur eines Implantats** eine wichtige Rolle.

Implantate mit fein mikrotexturierter Oberfläche sind **glatten Implantaten** in folgenden Punkten **überlegen**:

- **Niedrige Komplikationsraten** beispielsweise von Rotation, Flip-Over und Bottoming out<sup>1</sup>
- Kontrollierbare Implantatposition auch bei Implantaten mit anatomischer Form<sup>2</sup>
- **Lang anhaltende ästhetische Ergebnisse**, auch bei größeren Implantaten mit einem Volumen von über 350 ml<sup>1</sup>



# WANN DIE WAHL DES IMPLANTATS EINE MIKRO- TEXTURIERUNG ERFORDERT

- Wie stark ein Implantat texturiert sein sollte, hängt von **den Bedürfnissen der Patientin** und ihrer Anatomie ab
- Implantatoberfläche beeinflusst die Kapsel **und deren Struktur**
- **Feinmikrotexturierte Implantate werden von vielen Operateuren** wegen der besseren Interaktion des Implantats mit dem Gewebe **bevorzugt**. Diese Interaktion sorgt für eine **Reduktion der Komplikationen** wie z. B. Bottoming out, Flip-Over (insbesondere bei Implantaten über 350 ml), und Rotation des Implantats<sup>1</sup>
- **Bei glatten Implantaten besteht keine Gewebearchärenz**, was mit der **Zeit zu Komplikationen** führen kann, insbesondere bei größeren Implantaten<sup>1</sup>

TEXTURIERT VS. GLATT –  
WARUM KOMPROMISSE EINGEHEN?

## Arithmetische Rauheit (Sa) von Oberflächen \*



\*MESMO® Implantate werden in der international anerkannten ISO-Norm 14607:2018 als mikrotexturiert klassifiziert – dies erlaubt eine sichere und vorgabenkonforme internationale Vermarktung

## DIE VORTEILE VON GLATT UND TEXTURIERT KOMBINIERT

- Texturierte Implantate sind im Vergleich zu glatten Brustimplantaten mit weniger Komplikationen assoziiert<sup>1</sup>
- Wie von Paolo Montemurro et al. und Vincent K. S. Tay beschrieben, gelten für die Wahl von glatten Implantaten spezielle Anforderungen:
  - » Gute Gewebequalität
  - » Implantatgröße < 350 ml
  - » Operationstechnik
  - » Spezielle Nachsorge

» » » **MESMO® fein-mikrotexturierte** Implantate werden seit fast einem Jahrzehnt ohne jegliche Einschränkungen sowohl in runden als auch anatomischen Formen verwendet.



# PATIENTEN- ZUFRIEDENHEIT

Weltweit wurden hunderttausende Implantate mit MESMO® Oberfläche bei zufriedenen Patientinnen eingesetzt:

94%

gaben an, dass sich ihre Brüste weich und natürlich anfühlen<sup>7</sup>

97%

waren mit dem ästhetischen Ergebnis zufrieden oder sehr zufrieden<sup>7</sup>

98%

berichteten über eine bessere oder gleichbleibende Lebensqualität<sup>7</sup>

## MESMO® Komplikationsraten<sup>7</sup>


Alle Arten von Operationen\*

Komplikationsraten (%) nach 5 Jahren	MESMO® Alle Typen N = 308
Alle Komplikationen	<b>8.1%</b>
Revisionschirurgie	<b>4.9%</b>
Entfernung eines Implantats	<b>1.4%</b>
Kapselkontraktur (Baker Grad III-IV)	<b>0.4%</b>

\* Alle Arten von Operationen umfassen primäre Brustvergrößerung, primäre Rekonstruktion und Revisionschirurgie

## Kumulative Wahrscheinlichkeit für Komplikationsfreiheit<sup>7</sup>

Kaplan-Meier Analyse

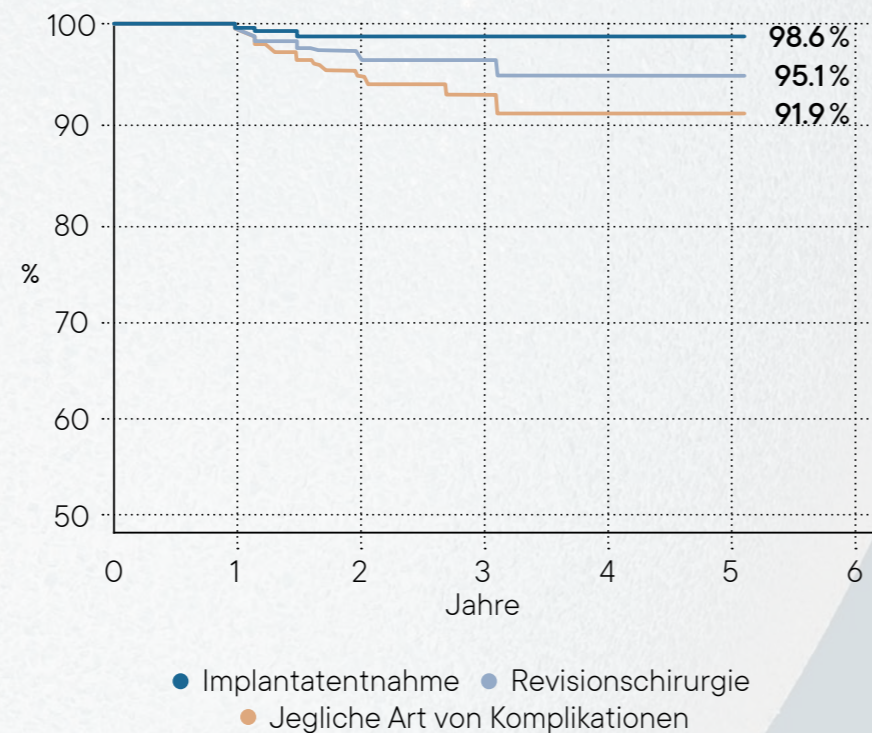


Zum Stand März 2021 wurden keine Fälle von BIA-ALCL mit MESMO® berichtet.


# BEWÄHRTE PATIENTEN-SICHERHEIT IM FOKUS




# MESMO® PRODUKTPORTFOLIO

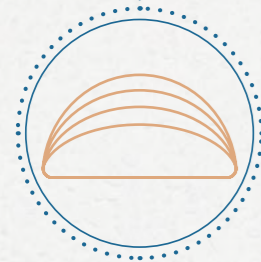


Même®  
runde Basis  
gleichmäßig gewölbtes Profil

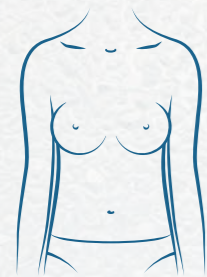


Replicon®  
runde Basis  
anatomische Form

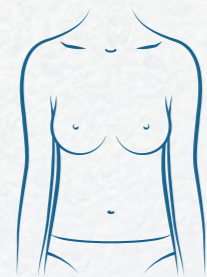

Opticon®  
verkürzte Basis  
anatomische Form

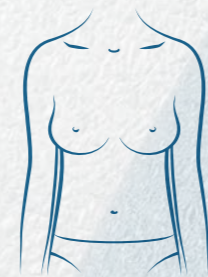

Optimam®  
verlängerte Basis  
anatomische Form

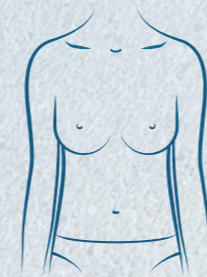

250


Optionen für  
den Operateur  
zur Auswahl

# WAHL DES RICHTIGEN MESMO® IMPLANTATS FÜR IHRE PATIENTIN

- Wählen Sie jetzt **das passende Implantat**.  
Die POLYfind! App unterstützt Sie dabei
- Holen Sie sich den neuesten gedruckten Produktkatalog.  
Wenden Sie sich an Ihren zuständigen  
POLYTECH Repräsentanten

Werden Sie Teil der  
MESMO® Erfolgsgeschichte!

Laden Sie die POLYfind! App  
jetzt herunter!

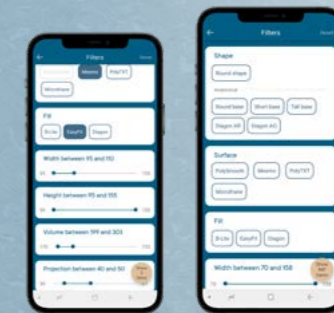

Zugriff erhalten Sie über Ihren zuständigen  
POLYTECH Repräsentanten



EINZIGARTIG UND  
VIELFÄLTIG



Erfolg bedeutet für mich, gleichbleibend für langanhaltende Patientenzufriedenheit zu sorgen. Bei der Implantatwahl und um allen Herausforderungen gerecht werden zu können, denen ich mich tagtäglich in meiner Praxis stellen muss, ist für eine große Vielseitigkeit und Planbarkeit sehr wichtig für mich. Aus diesem Grund verwende ich MESMO® Implantate bei den meisten meiner Brustvergrößerungen

DR. PAOLO MONTEMURRO



Als Chirurgen streben wir nach langfristigen ästhetischen Resultaten bei einer möglichst geringen Komplikationsrate. Die MESMO® Oberfläche bietet meinen Patientinnen eine sehr ausgewogene Textur.

DR. JOSE LUIS MARTIN DEL YERRO



# GARANTIEPROGRAMM „IMPLANTS OF EXCELLENCE“ FÜR MESMO®

Unser erweitertes Garantieprogramm wurde 2007 eingeführt und bietet Ihren Patientinnen spezielle Vorteile und Sicherheit.\*

## Vorteile des Programms



Mehr Vertrauen und Engagement



Die Patientinnen nehmen an einer jährlichen Umfrage teil und tragen damit zur Förderung von Innovation und Patientensicherheit bei



Lebenslange Garantie und Implantataustausch bei materialbedingter Ruptur



Möglichkeit für die Patientinnen in Kontakt zu bleiben

[ Siehe  
Garantie-  
bedingungen ]



SELBSTVERTRAUEN

A woman with long dark hair, wearing a red, sheer, long-sleeved dress, is shown in profile from the chest up. She is looking out a window with white curtains. The lighting is soft and natural, coming from the window. The overall mood is serene and elegant.

IHR ERFOLG  
IST UNSER ERFOLG

# AUSWAHLMÖGLICHKEITEN – EIN WESENTLICHER ERFOLGS- FAKTOR FÜR JEDEN CHIRURGEN

Seit über 35 Jahren arbeitet POLYTECH auf der Grundlage einer einfachen Erkenntnis:  
Unser Erfolg hängt vom Erfolg der Operateure ab.

Unsere Auswahl an MESMO® Implantaten orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen

Regelmäßige Anwender von MESMO® Implantaten bestätigen, dass die große Vielfalt der Implantate sie dabei unterstützt, ihre persönlichen Erfolgsziele zu erreichen:

- Sehr hohe Patientenzufriedenheit
- Extrem niedrige Komplikationsraten
- Deckung des Bedarfs an minimal texturierten Implantaten
- Differenzierung ihrer Praxis und Steigerung des geschäftlichen Wachstums

## Quellenangaben

- <sup>1</sup> P. Montemurro et al: Aesthetic Surgery Journal 2020, p. 1 – 7; DOI: 10.1093/asj/sjaa169
- <sup>2</sup> Calobrace et al., Long-Term Safety of Textured and Smooth Breast Implants, Aesthetic Surgery Journal, 2017, 1–11 ; DOI 10.1093/asj/sjx157
- <sup>3</sup> POLYTECH, data on file
- <sup>4</sup> Motiva Masterclass, Evolution of Breast Implants, Turkish National Congress, January 2020
- <sup>5</sup> PERLE™ Physician Brochure „The Art of Science“, 2020, p. 4
- <sup>6</sup> Wixrom R N et al. Aesth Surg J, 2019, 1-7; DOI 10.1093/asj/sjz153
- <sup>7</sup> Implants of Excellence, Annual Survey 2014 – 2019, POLYTECH, data on file

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH  
Alzheimer Str. 32  
64807 Dieburg | Deutschland  
Tel.: +49 (0) 6071 98630  
Fax: +49 (0) 6071 986330  
E-Mail: [info@polytechhealth.com](mailto:info@polytechhealth.com)

Weitere Informationen erhalten Sie auf:  
[www.polytechhealth.com](http://www.polytechhealth.com)

Folgen Sie uns auf

