

DAS TECHNOLOGISCH FORTSCHRITTLICHSTE MICRONEEDLING-GERÄT
ZUR ERNEUERUNG DER HAUTSTRUKTUR



HALTEN SIE IHR
PATIENTENVERSPRECHEN DER

*inneren
Schönheit*

MIT DER TECHNOLOGIE
VON SKINPEN® PRECISION

SkinPen[®]
BY CROWN AESTHETICS

SKINPEN® PRECISION IST IN SACHEN TECHNOLOGIE UND LEISTUNGSVALIDIERUNG FÜHREND

Sie und Ihre PatientInnen können sich auf die Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit dieses Microneedling-Geräts verlassen

1 Das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät und -Verfahren, CE-gekennzeichnet und ISO-zertifiziert

42 Vertrieb in 42 Ländern weltweit

90 Qualität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit durch über 90 Validierungsstudien gesichert

16.000 Über 16.000 Ästhetikpraxen weltweit arbeiten mit SkinPen Precision

2 Mio.+ Bereits über 2 Millionen PatientInnen haben sich für eine SkinPen Precision Behandlung entschieden

3 Mio. Etwa 3 Millionen Mikrokanäle werden bei einer 30-minütigen Gesichts- und Halsbehandlung erzeugt

HOHE PATIENTENZUFRIEDENHEIT SPRICHT SICH HERUM

WEITEREMPFEHLUNG DER BEHANDLUNG AN VERWANDTE UND BEKANNTE*

90%

nach 1 Monat und 6 Monaten*

ZUFRIEDENHEIT MIT DER BEHANDLUNG*

85%

der PatientInnen gaben nach 1 Monat und 6 Monaten an, mit der Behandlung zufrieden zu sein*



* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter [skinpen.com/International](https://www.skinpen.com/International).

SKINPEN PRECISION BEGEISTERUNG

SkinPen Precision wird in den Medien gekrönt und gilt in der Ästhetikbranche als erstklassige Behandlung.



BRINGEN SIE IHRE INNERE SCHÖNHEIT WIEDER ANS LICHT

Geben Sie Ihren PatientInnen die Möglichkeit, ihr körpereigenes Kollagen zu stimulieren, um ein jüngeres Aussehen zu erreichen

SkinPen® Precision ist ein Microneedling-Gerät, das den natürlichen Wundheilungsprozess der Haut auslöst, um Aknenarben zu behandeln und das Erscheinungsbild von feinen Linien und Fältchen, chirurgischen Narben, Dehnungstreifen und vergrößerten Poren zu verbessern. SkinPen Precision wird außerdem zur Verbesserung des kosmetischen Erscheinungsbildes von Pigmentierungsstörungen (Dyschromie) eingesetzt, indem die Pigmentierungsaktivität der Haut auf ein normales Maß zurückgebracht wird.



SECHS INDIKATIONEN:

Aknenarben
Feine Linien und Fältchen
Operationsnarben
Dehnungstreifen
Vergrößerte Poren
Pigmentierungsstörungen
(Dyschromie)

FÜNF BEHANDLUNGSBEREICHE

Gesicht
Hals
Dekolleté
Hände
Körper



SkinPen® Precision – FDA-zugelassen:

In den USA ist SkinPen® Precision ein medizinisches Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung von Fältchen am Hals für Hauttypen II-IV nach Fitzpatrick sowie zur Reduzierung von Aknenarben im Gesicht von Erwachsenen aller Hauttypen ab 22 Jahren vorgesehen ist.

Indikationen und Behandlungsbereiche am Körper für SkinPen® Precision können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter skinpen.com/international

ENTWICKELT UND GEFERTIGT IN DEN USA

SkinPen® Precision mit unübertroffener Technologie und Validierung*

ERSTE ZULASSUNG VON GERÄT UND VERFAHREN IN DEN USA DURCH FDA.

Überlegene Eigenschaften: Wirksamkeit und Sicherheit haben sich in mehreren Publikationen mit Peer-Review sowie in 90 Validierungsstudien bewährt.*

Patentierte Technologie zur intuitiven Drehzahlkontrolle für die optimale Behandlung von unterschiedlich dicker Haut

- Garantierte Aufrechterhaltung von 7.000 rpm (\pm 70 rpm) bei jeder Hautdicke.
- Müheloser Einsatz ohne manuelle Drehzahleinstellungen.

Das einzige kabellose Gerät mit induktivem Ladevorgang

- Es bietet die Einsatzflexibilität und Sicherheit eines kabellosen Geräts ohne die Gefahr, dass das Kabel in den Behandlungsbereich gelangt und ein Kontaminationsrisiko ergibt.
- Optimaler Antrieb ungeachtet der verbleibenden Akkuladung.
- Das Gerät wird fortlaufend aufgeladen und verfügt so stets über die nötige Energie.

LED-Smarttechnologie für optimale Leistung

- Software-gesteuerte Technologie zur Anzeige der Akkuladepazität und für Mechanismen zur Fehlerbehebung.

Das einzige Handgerät mit Ultraschallabdichtung auf dem Markt

- In Kombination mit einer speziellen Bio-Schutzhülle für das Handgerät dringt garantiert keine Flüssigkeit durch die Naht der Schutzhülle oder die Schnittstelle zwischen Nadelkopf und Gerät ein.

Lithium-Akku von höchster Qualität

- Wir stehen zu unserem Gerät bei seiner verlässlichen, beständigen und überlegenen Technologie.
- Der für medizinische Ansprüche geeignete Motor läuft kontinuierlich während 6–7 Stunden mit vollständig aufgeladenem Akku.

Erstklassiges ergonomisches Design

- Von Ärzten getestet und für optimale Benutzerfreundlichkeit entwickelt.
- Keine Ermüdung bei längerer Bedienung dank perfekter Ausgewogenheit.
- Mit 141,7 g das leichteste Gerät auf dem Markt.**
- Keine lästigen Bedienknöpfe zur Drehzahleinstellung. Die Technologie für intuitive Drehzahlkontrolle übernimmt dies auf optimale Weise für Sie.



FDA-ZULASSUNG, CE-KENNEICHNUNG KLASSE IIA, ARTG (EINTRAG IM AUSTRALIAN REGISTER OF THERAPEUTIC GOODS), ZULASSUNG DURCH MEDSAFE (NEUSEELAND) UND HEALTH CANADA, ISO-ZERTIFIZIERT

* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien mit Beteiligung der FDA sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter skinpen.com/International.

** Unter kabellosen Geräten der Klasse IIA mit FDA-Zulassung und CE-Kennzeichnung.

DIE KONKURRENZLOSE TECHNOLOGIE, AUF DIE SIE UND IHRE PATIENTINNEN SICH VERLASSEN KÖNNEN

Fortschrittlicher Nadelkopf mit FDA-Zulassung, in den USA entwickelt*

Minimierung von Rückfluss und Kreuzkontaminationsrisiko

- Validierte Sperrfunktion zum einmaligen Gebrauch: So konzipiert, dass ein Nadelkopf nur zur Behandlung einer PatientIn verwendet werden kann.

Garantiertes Eindringen bis in die ausgewählte Tiefe

- Gewährleistet präzises und zuverlässiges Eindringen in eine Tiefe von bis zu 2,5 mm.
- Garantierte Geräteleistung in der für die jeweilige PatientIn als sicher befundenen Tiefe.



Komplette Einstich- und Rückzugsbewegung der Nadeln

- Der Hubkolbenmechanismus ist zur präzisen Einstellung im Einweg-Nadelkopf untergebracht.
- Im Gegensatz zu Federkolbenmechanismen in anderen Geräten, ermöglicht der gekoppelte Mechanismus bei SkinPen Precision eine komplette und einheitliche Einstich- und Rückzugsbewegung der Nadeln bei jeder Rotation.

Nadeln bleiben garantiert scharf über Einsätze von mindestens 80 Minuten

- 14 chirurgische Nadeln aus Edelstahl mit validierter Schärfe, Haltbarkeit und Eindringtiefe.
- Einheitliche Nadelleistung ungeachtet von Dicke oder Beschaffenheit der Haut für 1.600 Mikrokanäle pro Sekunde.



* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien mit Beteiligung der FDA sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter [skinpen.com/International](https://www.skinpen.com/International).

ENTDECKEN SIE DIE EINZIGARTIGKEIT UND DEN HOHEN WERT DES ALL-IN-ONE BEHANDLUNGSSETS VON SKINPEN® PRECISION.

Behandlungsset – sicher und praktisch



1



Advanced Cartridge Unit (ACU – NADELKOPF)

Medizinischer Einweg-Nadelkopf, sterilisiert mit EO (Ethylenoxid). Patentierte, von der FDA zugelassen und für höchste Leistungsfähigkeit und Sicherheit validiert. Für den einmaligen Gebrauch pro Patientin.

2



Lift-HG-Gleitgel (15 ml)

Das einzige von der FDA zugelassene Gleitgel mit klinisch bewährter Sicherheit für Microneedling-Verfahren. Es handelt sich um ein leichtes, wasserbasiertes topisches Mittel, das unmittelbar vor der Behandlung auf die Haut aufgetragen wird und als mechanische Barriere dient, die die Reibung auf der Hautoberfläche verringert, um das Verfahren für den Patienten angenehmer zu gestalten. LIFT HG enthält keine Medikamente oder Biopharmazeutika und ist nicht zytotoxisch.

3



Beruhigender Rescue-Wirkstoffkomplex (10 ml)

Hautberuhigender kosmetischer Wirkstoffkomplex, der nach der Behandlung großzügig auf die Haut aufgetragen wird, um die Hautreizung zu lindern und die Haut zu beruhigen. Enthält Magnesium, Zink und Kupfer sowie Ethylmacadamat und Natriumhyaluronat. Zur Anwendung nach 24 Stunden nach der Behandlung vorgeschlagen

4



Passgenaue Einweg-Bio-Schutzhülle

Beständige Einweg-Schutzhülle, die das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Behandlungen minimiert.

SANFTES VERFAHREN MIT TIEFGREIFENDEN ERGEBNISSEN

Aknenarben



Frau
Anzahl Behandlungen: 6



Frau
Anzahl Behandlungen: 6

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Cathy A. Presnick, Licensed Aesthetician, A Perfect Complexion, LLC, Melbourne, FL (USA)

PATIENTINNEN UND ÄRZTE VERLASSEN SICH AUF DEN FORTSCHRITTLICHEN STAND DER TECHNIK VON SKINPEN® PRECISION

Aussehen von Aknenarben*

80 %

Nach 1 Behandlungsmonat stellten 80 % der PatientInnen eine Verbesserung im Aussehen ihrer Aknenarben fest.

90 %

Nach 6 Monaten stellten 90 % der PatientInnen eine Verbesserung fest.


0 1 2 3 4 5 6

Basierend auf einer klinischen Studie an 41 PatientInnen zwecks Bestätigung der Sicherheit und Wirksamkeit des SkinPen-Precision-Systems für die Behandlung von Aknenarben im Gesicht. Die PatientInnen wurden an Tag 1, Tag 30 und Tag 60 behandelt, Nachbeobachtungstermine folgten 1 Monat sowie 6 Monate nach der letzten Behandlung (Tag 60).*

* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter skinpen.com/International.

REGEN SIE MIT SKINPEN® PRECISION DIE HAUTVERJÜNGUNG AN

Feine Linien und Fältchen im Gesicht

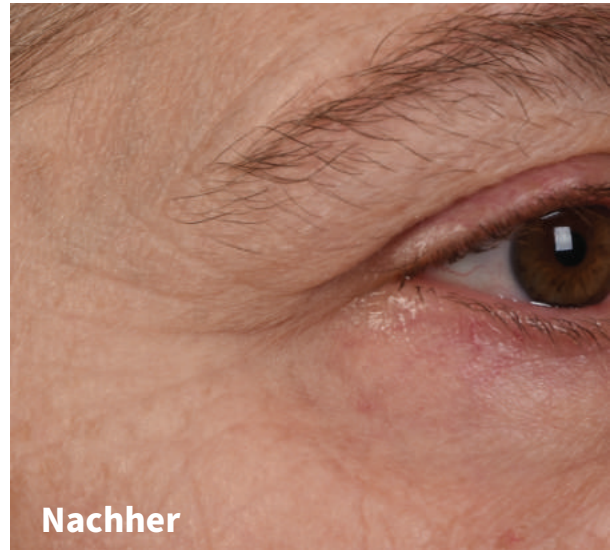

Frau

Anzahl Behandlungen: 4

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Klinische Studie zu SkinPen Precision.*



Frau

Anzahl Behandlungen: 5

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Arizona Microneedling.*

Reaktionen nach Abschluss der Behandlung:

Bei einigen PatientInnen kam es nach der Behandlung zu Reaktionen wie Trockenheit, Rauheit, Straffheit, Juckreiz, Abschuppung, Beschwerden und Druckempfindlichkeit, die nach Abschluss der Behandlung ein bis sechs Tage lang anhielten.*

* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter skinpen.com/International.


SKINPEN® PRECISION: SCHREIBEN SIE DIE GESCHICHTE IHRER HAUT NEU

Feine Linien und Fältchen am Hals



Frau
Anzahl Behandlungen: 1

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: BMED Schulungszentrum, Ukraine

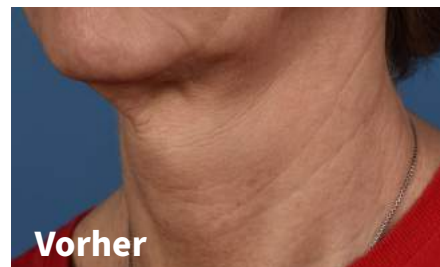

Frau
Anzahl Behandlungen: 4

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Klinische Studie zu SkinPen Precision.*



Frau
Anzahl Behandlungen: 4

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Klinische Studie zu SkinPen Precision.*

Reaktionen nach Abschluss der Behandlung:

Bei einigen PatientInnen kam es nach der Behandlung zu Reaktionen wie Trockenheit, Rauheit, Straffheit, Juckreiz, Abschuppung, Beschwerden und Druckempfindlichkeit, die nach Abschluss der Behandlung ein bis sechs Tage lang anhielten.*

SKINPEN® PRECISION FÜR LEBENSVERÄNDERNDE ERGEBNISSE

Operationsnarben



Brachioplastiknarbe 6 Wochen nach der Operation, vor der ersten Microneedling-Behandlung.




Brachioplastiknarbe 8 Wochen nach der dritten Microneedling-Behandlung.

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Claytor, R. Brannon M.D.; Sheck, Casey Gene D.O.; Chopra, Vinod M.D. Microneedling Outcomes in Early Postsurgical Scars. Plastic and Reconstructive Surgery: (Microneedling-Ergebnisse bei frühen postoperativen Narben. Plastische und rekonstruktive Chirurgie.) September 2022 – Band 150 – Ausgabe 3 – S. 557e-561e doi: 10.1097/PRS.00000000000009466



Facelifting-Operationsnarbe 13 Wochen nach der Operation, vor der ersten Microneedling-Behandlung.

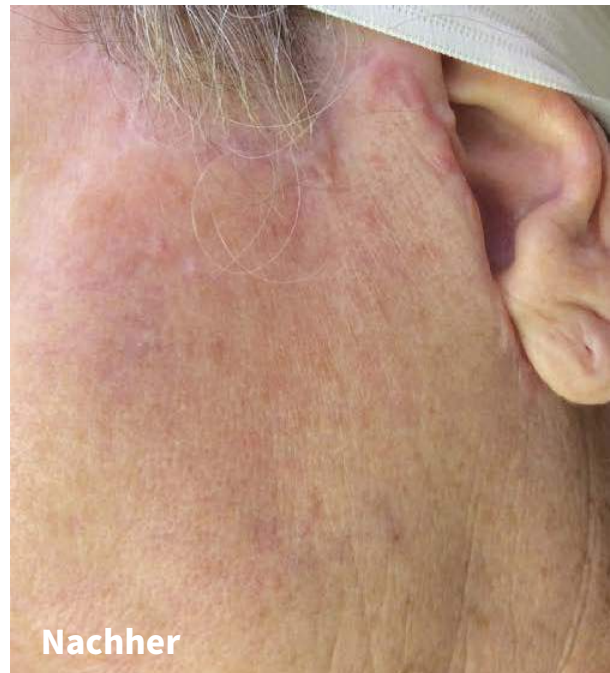

Facelifting-Operationsnarbe 8 Wochen nach der dritten und letzten Microneedling-Behandlung.

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Claytor, R. Brannon M.D.; Sheck, Casey Gene D.O.; Chopra, Vinod M.D. Microneedling Outcomes in Early Postsurgical Scars. Plastic and Reconstructive Surgery: (Microneedling-Ergebnisse bei frühen postoperativen Narben. Plastische und rekonstruktive Chirurgie.) September 2022 – Band 150 – Ausgabe 3 – S. 557e-561e doi: 10.1097/PRS.00000000000009466

FINDEN SIE MIT SKINPEN® PRECISION ZU IHRER INNEREN SCHÖNHEIT

Vergrößerte Poren



Frau

Anzahl Behandlungen: 1

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: The Luxe Estie, Detroit, MI



Frau

Anzahl Behandlungen: 2

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: The Luxe Estie, Detroit, MI


SKINPEN® PRECISION: ENTDECKEN SIE IHRE BESTE HAUT

Pigmentierungsstörungen (Dyschromie)



Frau
Anzahl Behandlungen: 4

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Rosenpark Research, Dr. Sonja Sattler

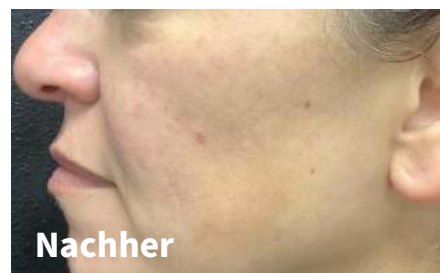

Frau
Anzahl Behandlungen: 2

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: ANEU Med Spa, McFarland, WI



Frau
Anzahl Behandlungen: 4

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von: Rosenpark Research, Dr. Sonja Sattler

MIT SKINPEN® PRECISION HOLEN SIE NEUE PATIENTINNEN IN IHRE PRAXIS



Klinisch bewährte Sicherheit und Wirksamkeit*

Für die meisten PatientInnen geeignet, auch jene, für die Therapien auf Basis von Wärme oder Chemikalien nicht infrage kommen.



Für alle Hauttöne und -typen das ganze Jahr über*

Vielseitig einsetzbar: Für alle Hauttypen geeignet (Fitzpatrick I–VI).
Für die meisten PatientInnen und das ganze Jahr über.



Natürlich

PatientInnen wünschen sich einen „natürlicheren“ oder „organischeren“ Ansatz mit Wundheilung durch ihr eigenes Kollagen für dynamische Ergebnisse das ganze Jahr über.



Einfach, schnell und angenehm**

Betäubung, Behandlung und Feuchtigkeitszufuhr in einem nur 30-minütigen Verfahren.
Für schnelle und lohnende Ergebnisse.



Praktisch keine Ausfallzeiten

PatientInnen können so rasch wie möglich ihre Arbeit wieder aufnehmen und ihr Leben ohne Ausfallzeiten genießen.

* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter [skinpen.com/International](https://www.skinpen.com/International).

** Eine leichte Betäubungscreme kann aufgetragen werden, um eine schmerzfreie Behandlung zu ermöglichen.

SKINPEN® PRECISION SETZT HÖCHSTE STANDARDS

SkinPen®
BY CROWN AESTHETICS

Medizinische Spitzenleistungen: Das technologisch fortschrittlichste Microneedling-Gerät zur Erneuerung der Hautstruktur bietet Ihnen und Ihren PatientInnen Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.*

Mit klinisch bewährter Sicherheit und Wirksamkeit.*

- Das erste von der FDA zugelassene Microneedling-Gerät und -Verfahren.
- Mit CE-Kennzeichnung, ISO-Zertifizierung und Absicherung durch über 90 Validierungsstudien.*
- Minimales Risiko einer Kreuzkontamination.

Hohe Leistung, auf die Sie sich verlassen können:

- Technologie für intuitive Drehzahlkontrolle mit garantiert 7.000 rpm. Ohne manuelle Drehzahleinstellung.
- Lithium-Akku von höchster Qualität.
- Nadeln bleiben garantiert scharf über Einsätze von mindestens 80 Minuten.
- Ergonomisches Design, von Ärzten im Praxiseinsatz auf Leistungseffizienz getestet.

Präzision und Einheitlichkeit:

- Nadeln dringen garantiert in die Tiefe ein, auf die das Gerät eingestellt ist (bis zu 2,5 mm).
- Garantiert einheitliche Nadelleistung bei unterschiedlich dicker Haut.

Ästhetische und lebensverändernde Ergebnisse:

- 90 % der PatientInnen stellen erhebliche Verbesserungen fest.*
- Über zwei Millionen PatientInnen haben sich bereits für dieses zuverlässige Microneedling-Gerät entschieden.

Garant für hohe Umsätze:

- Hoher Nutzen durch das sichere und praktische allumfassende Behandlungsset.
- Delegierbar. Benutzerfreundlich.
- Für eine Vielzahl von PatientInnen. Für alle Hauttöne und -typen geeignet.
- Visitenkarte für PatientInnen, für die kosmetische Behandlungen etwas Neues sind.
- Vielseitig einsetzbar. Mit einem einzigen Nadelkopf können mehrere Zielbereiche behandelt werden.
- Nachweislich hohe Patientenzufriedenheit mit Weiterempfehlungen, sodass Sie Ihre Praxis ausdehnen können.*
- Mit SkinPen Precision können Sie Ihre derzeitigen Behandlungsangebote für PatientInnen erweitern.
- Da drei bis sechs Behandlungen empfohlen werden, ist garantiert, dass PatientInnen mehrmals zu Ihnen kommen.
- Zufriedene PatientInnen kommen mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder zu Ihnen in die Praxis.



* Interne Unterlagen. Zusammenfassungen von klinischen Studien sowie vollständige Informationen zum Einsatz des Microneedling-Geräts SkinPen Precision finden Sie unter skinpen.com/international.

** Interne Unterlagen. Bellus Medical. 2017; Gebrauchsanweisung für SkinPen.

SKINPEN PRECISION FÜR SIE ERREICHBAR

SkinPen®
BY CROWN AESTHETICS

**Unsere Kundendienst wird gern Ihre Fragen
beantworten und Ihnen weiter Informationen liefern**



069 509 58919
Mo-Fr 9:00-17:00



Bestellungen@crownaesthetics.com

Falls Sie medizinische/klinische
Informationen benötigen, wenden Sie
sich bitte an unsere Abteilung Medical
Affairs unter:

Medinfo@crownaesthetics.com

Für allgemeine Anfragen:

Anfragen@crownaesthetics.com



Weitere Informationen erhalten Sie unter skinpende.com



SkinPen® Precision – FDA-zugelassen:

In den USA ist SkinPen® Precision ein medizinisches Microneedling-Gerät mit Zubehör, das zur Behandlung von Fältchen am Hals für Hauttypen II–IV nach Fitzpatrick sowie zur Reduzierung von Aknenarben im Gesicht von Erwachsenen aller Hauttypen ab 22 Jahren vorgesehen ist.

Indikationen und Behandlungsbereiche am Körper für SkinPen® Precision können je nach Land variieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter skinpen.com/international